

Confira os produtos disponíveis em nosso **Setor Comercial**

AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL



Especificação Técnica:

- Impermeável nas mangas, tórax, abdômen e membros inferiores ou repelente.
- Tiras na cintura e velcro no pescoço.
- Material de alta resistência e maleável, proporcionando mais conforto ao usuário.
- Confeccionado com mangas raglan.
- Repelente a fluido.
- Acompanha Toalha para secagem das mãos.
- Cartão TAG de transferência asséptica.
- Embalado individualmente, com dupla embalagem (dobra asséptica)
- Produto estéril.
- Esterilizado por Óxido de Etileno.
- Embalagem de papel grau cirúrgico e filme hospitalar.
- Produto de uso único – Proibido reprocessar.

Advertências/Precauções: Não utilize se a embalagem estiver violada, molhada ou danificada. Armazenar em local limpo e seco. Transportar na embalagem original. O descarte deve obedecer às normas de lixo hospitalar.

MARCA: DESCARPACK / POLAR FIX

TAMANHO: G

Descrição:

Indicação de uso:

- Indicado para proteção dos profissionais em procedimentos cirúrgicos, que exigem uma barreira contra líquidos.

Composição:

- Confeccionado em trilaminado de não tecido 100% polipropileno SSMMS (Spunbond-Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond), com punho em malha.zz



AVENTAL DESCARTÁVEL DE PROCEDIMENTO G.30



Especificação Técnica:

- Tiras na cintura e pescoço.
- Material de alta resistência e maleável, proporcionando mais conforto ao usuário.
- Tamanho: único.
- Manga longa com punho de látex.
- Produto não estéril.
- Produto de uso único – Proibido reprocessar.
- Disponível na cor branca.

Advertências / Precauções: Armazenar em lugar limpo evitando a exposição direta ao calor, luz e umidade. Contém látex natural.

MARCA: DESCARPACK / POLAR FIX / MEDIX

TAMANHO: ÚNICO

Descrição:

Indicação de uso:

- Indicado em procedimentos laboratoriais e exames, podendo ser utilizado por equipe médica, enfermeiros, pacientes e visitantes.

Composição:

- Confeccionado em 100% polipropileno.



CAIXA PERFUROCORANTE DESCARTEX



MARCA: DESCARPACK / POLAR FIX

TAMANHOS: 03L; 07L E 13L

Especificação Técnica:

- Produto não estéril.
- Revestido de papelão couro ondulado.
- Atende aos requisitos de resistência das alças, estabilidade, compressão localizada, perfuração, vazamento e travamento da tampa.
- Com trava de segurança.
- O coletor é constituído de:
 - Sacola Plástica amarela
 - Fundo rígido
 - Cinta Lateral
 - Bandeja Interna
 - Alça dupla para transporte
- Disponível somente na cor amarelo ouro.



Descrição:

Indicação de uso:

- Indicado para descarte e transporte de materiais, cortantes e perfurantes.

Composição:

- Confeccionado em papelão que proporciona segurança total ao usuário.



KIT CIRÚRGICO GINECO URO. E PROCTO (GUP) COM BOLSA COL. DE FLUIDOS E CAMPO MAYO



MARCA: POLAR FIX / HEALTH QUALITY

Especificação Técnica:

- Os componentes dos Kits são embalados em embalagem primária de papel grau cirúrgico e filme hospitalar e selados termicamente.

Advertências / Precauções: Não utilize se a embalagem estiver violada, molhada ou danificada. Armazenar em local limpo e seco. Produto de uso único. Proibido reprocessar. O descarte deve obedecer às normas de lixo hospitalar. Esterilizado por óxido de etileno.

Contém: 1 unidade

Descrição:

Indicação de uso:

- Polipropileno, Polietileno e Viscose.

Instrução de uso:


- Cobertura de Mesa de Instrumentos: Posicionar no centro da mesa e abrir no sentido da largura da mesa (direita/esquerda).

Perneiras: Posicionar nos membros inferiores, aderindo a fita adesiva.

Campo Inferior: Posicionar o campo sob o quadril do O campo será fixado apenas com o peso do paciente.

Campo Superior: Posicionar o campo, fixando a fita adesiva na região abdominal do paciente, segurando as extremidades e puxando no sentido da haste até fixá-la.

Bolsa de Instrumentos: Aderir no local desejado.

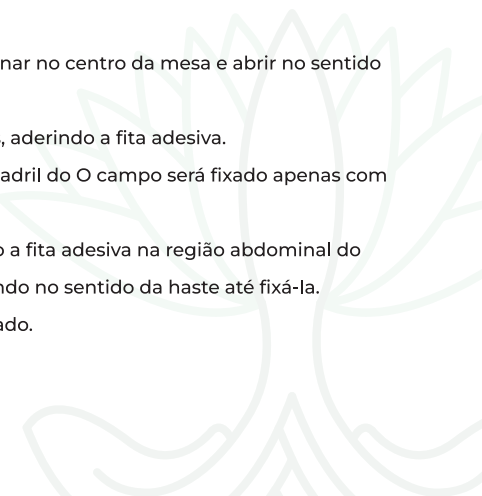

LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICA COM PÓ



MARCA: DESCARPACK / MEDIX

TAMANHO: P, M, G

Descrição:

Indicação de uso:

• A Luva de Látex para Procedimentos Não Cirúrgicos da Descarpac é indicada para uso por profissionais da saúde em hospitais, consultórios ou clínicas médicas, assim como em clínicas de odontologia ou veterinárias.

• A luva atua formando uma barreira física, protegendo o usuário contra eventuais contaminações.

Especificações do produto:

- Cartucho com 100 unidades.
- Tamanhos: P, M, G.

Especificação Técnica:

A Luva para Procedimentos Não Cirúrgicos com Pó da Descarpac é uma luva de látex descartável, voltada para a utilização por profissionais da saúde em procedimentos não invasivos e não estéreis. A luva tem como função prevenir o contato do usuário contra o risco de contaminações por líquidos ou fluidos.

Características e detalhes:

- * Composta de látex de borracha natural e amido de milho.
- * Lubrificada com pó bioabsorvível.
- * Ambidestra e com superfície lisa.
- * Oferece maior resistência com redução de fadiga.
- * Certificado pelo INMETRO.
- * Possui Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho.
- * Produto não estéril, descartável e de uso único.

MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA COM ELÁSTICO



MARCA: DESCARPACK / POLAR FIX / MEDIX

TAMANHO: ÚNICO

Descrição:

Indicação de uso:

• Indicado para servir de barreira física à propagação de contaminantes, particulados entre outros.

Composição:

- Com elástico: 100% Polipropileno.
- Possuem clipe nasal confeccionado em alumínio plastificado.

Especificação Técnica:

- Isento de fibras de vidro e isento de látex.
- Hipoalergênica.
- Tamanho: 17,5 cm x 9,2 cm.
- Clip Nasal: Aproximadamente 13 cm.
- Gramatura: 70g/m2.
- BFE: 98,8%.
- Não inflamável.
- Não Estéril.
- Contém 50 unidades.
- Com Elástico.
- Tripla.
- Cor: Branca.

Advertências / Precauções:

Produto de uso único. Proibido reprocessar. Destruir após o uso. O descarte deve obedecer às normas de lixo hospitalar.

COMO USAR A MÁSCARA DE FORMA SEGURA?



PAPEL GRAU CIRÚRGICO



MARCA: POLAR FIX / ZERMATT

TAMANHO: 100MM X 100MM; 150MM X 100M;
200MM X 100M; 250MM X 100M; 300MM X
100M; 350MM X 100M; 400MM X 100M;
450MM X 100M

Descrição:

Indicação de uso:

• Indicado para envolver e proteger todo material a ser esterilizado. Papel grau cirúrgico que garante a resistência mecânica, barreira microbiológica e o controle de porosidade para manter a esterilidade por autoclave a vapor ou Óxido de Etileno.

Composição:

• Confeccionada em papel grau cirúrgico e filme bilaminado.

Especificação Técnica:

- Bobina
- Filme laminado que suporta as tensões de manipulação, triplamente selado, garantindo proteção e possibilitando abertura asséptica.
- Com indicador impresso para os processos de Óxido de Etileno e a Vapor na área de selagem.
- Produto não estéril.
- Produto de uso único – Proibido reprocessar.
- Indicador de viragem: Mudança da coloração rosa para marrom em esterilização por autoclave a vapor e de azul para marrom em esterilização em Óxido de Etileno.

Advertências / Precauções: Armazenar em local limpo e seco, ao abrigo da luz solar direta.



SAPATILHA PROPÉ G30



MARCA: DESCARPACK / POLAR FIX /
MEDIX

TAMANHO: ÚNICO



Descrição:

Indicação de uso:

• É utilizado sobre os sapatos em hospitais, no centro cirúrgico, unidades de isolamento, clínicas e pronto-socorro, quando do ingresso em áreas com controle de infecção. São utilizadas para proteção durante a realização de procedimentos em geral por profissionais como médicos, veterinários, dentistas, farmacêuticos, enfermeiras, etc, como também na proteção do paciente durante a realização de procedimentos assépticos.

Composição:

• 100% polipropileno – Não Tecido com elástico em látex em alumínio plastificado.

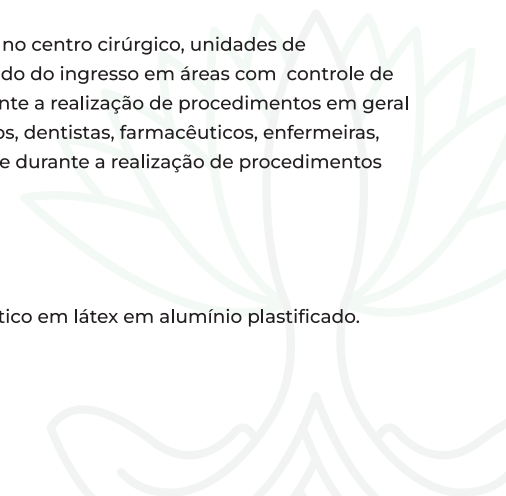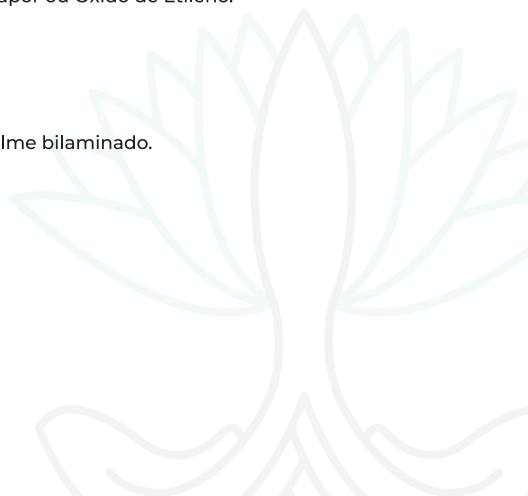

SERINGA DESCARTÁVEL SLIP



MARCA: DESCARPACK
TAMANHO: 01 ML S/AG SLIP; 03ML S/AG SLIP; 05ML S/AG SLIP; 10ML S/AG SLIP; 20ML S/AG SLIP

Especificação Técnica:

- Fabricada em polipropileno.
- Estéril.
- Atóxica e apirogênica.
- Lubrificada.
- Cilindro transparente.
- Trava para controle do deslizamento.
- Aprovada pelo INMETRO.
- Descartável e de uso único.



Descrição:

Indicação de uso:

- As Seringas Descarpac foram especialmente desenvolvidas para uso em hospitais, clínicas, laboratórios e farmácias para a aplicação de medicamentos.
- As seringas são apresentadas em diversos tamanhos para melhor atender as necessidades dos profissionais de saúde com qualidade e segurança.

Aplicação do Produto :

- Segurança contra vazamentos ou acidentes na aspiração.
- Escala nítida que permite fácil leitura da dosagem do fluído.
- Fabricadas a partir de resinas de polipropileno que proporciona maior transparência.
- Siliconado internamente, garantindo suavidade no deslize e no controle preciso para aplicação e aspiração de medicamentos.

SERINGA DESCARTÁVEL LOCK



Especificação Técnica:

- Fabricada em polipropileno.
- Estéril.
- Atóxica e apirogênica.
- Lubrificada.
- Cilindro transparente.
- Trava para controle do deslizamento.
- Aprovada pelo INMETRO.
- Descartável e de uso único.

MARCA: DESCARPACK

TAMANHO: 03ML S/AG LOCK/ 05ML S/AG LOCK/ 10ML S/AG LOCK/ 20ML S/AG LOCK

Descrição:

Indicação de uso:

- Desenvolvida para aplicação de medicamentos pela via parenteral e coleta de sangue.

Composição:

- As seringas são apresentadas em diversos tamanhos para melhor atender as necessidades dos profissionais de saúde com qualidade e segurança.

SERINGA INSULINA



MARCA: DESCARPACK
1ML AG 13X0,45

Descrição:

Indicação de uso:

• Desenvolvida para aplicação de insulina pela via subcutânea, atendendo as necessidades dos profissionais de saúde e portadores de diabetes com segurança e qualidade.

Composição:

• Polipropileno (polímero plástico inerte, ou seja, não reage com os medicamentos).

Especificação Técnica:

- Fabricada em polipropileno.
- Estétil.
- Atóxica e apirrogênica.
- Seringa graduada em unidades internacionais onde 100 UI é equivalente a 1 mL.
- Lubrificada.
- Cilindro transparente.
- Êmbolo com ponteira ou cônico evitando desperdício do medicamento.
- Trava para controle do deslizamento.
- Aprovada pelo INMETRO.
- Disponível com agulha desconectável 13 x 0,45 mm.
- Descartável e de uso único.



TOUCA DESCARTÁVEL G30



Especificação Técnica:

- Não estétil.
- Touca sanfonada e com elástico.
- Gorro com tiras.
- Uso descartável e individual.

Advertências/Precauções: Armazenar em local limpo e seco, ao abrigo da luz solar direta.

Tamanho: único

MARCA: DESCARPACK / POLAR
FIX/MEDIX

TAMANHO: ÚNICO


Descrição:

Indicação de uso:

• Utilizado para a cobertura dos cabelos, protegendo desta maneira o ambiente e o paciente de contaminação.

Composição:

- Gorro: 100% Polipropileno – Não tecido com tira
- Touca: 100% polipropileno – Não Tecido com elástico em látex

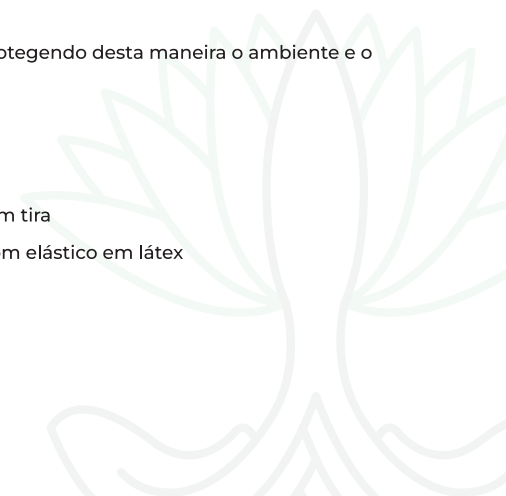

WRAPS PARA ESTERILIZAÇÃO SMS 60G



MARCA: POLAR FIX / HEALTH QUALITY

TAMANHO: 40CM X 40CM / 60CM X 60 CM / 75CM X 75CM / 100CM X 100CM / 120CM X 120CM

Descrição:

Indicação de uso:

- Indicado para envolver e proteger instrumentos cirúrgicos e materiais a serem esterilizados a vapor, óxido de etileno ou plasma de peróxido de hidrogênio.

Composição:

- Confeccionado em trilaminado de não tecido 100% polipropileno SMS (Spunbond, Meltblown, Spunbond).

Especificação Técnica:

- Produto não estéril.
- Produto de uso único – Proibido reprocessar.
- Compatível e resistente as condições físicas de esterilização.
- Permite penetração e remoção do agente esterilizante.
- Não gera partículas.
- Seguro e atóxico.
- Repelência a líquidos.

Advertências/Precauções: Armazenar o produto em local limpo e seco, temperatura ambiente e ao abrigo da luz direta.



KIT CIRÚRGICO UNIVERSAL ESTÉRIL



MARCA: POLAR FIX / HEALTH QUALITY

Descrição:

Indicação de uso:

- Polipropileno, Polietileno e Viscose.

Instrução de uso:

- 1 • Cobertura de Mesa de Instrumentos:** Posicionar no centro da mesa e abrir no sentido da largura da mesa (direita/esquerda).
- 2 • Campo Inferior:** Posicionar o campo abaixo da área de incisão, fixar com a fita adesiva segurando as extremidades e puxando no sentido dos pés do paciente.
- 3 • Campo Superior:** Posicionar o campo acima da área de incisão, fixar com a fita adesiva segurando as extremidades e puxando no sentido da haste até fixá-la.
- 4 • Campo Lateral:** Posicionar o campo lateralmente á área de incisão e fixar com a fita adesiva.
- 5 • Bolsa de Instrumentos:** Aderir no local desejado.

Especificação Técnica:

- Os componentes dos Kits são embalados em embalagem primária de papel grau cirúrgico e filme hospitalar e selados termicamente.

Advertências/Precauções: Não utilize se a embalagem estiver violada, molhada ou danificada. Armazenar em local limpo e seco. Produto de uso único. Proibido reprocessar. O descarte deve obedecer às normas de lixo hospitalar. Esterilizado por óxido de etileno.

Contém: 1 unidade



EQUIPO MACROGOTAS LUERLOCK



DESCARPACK/MEDIX

Especificação Técnica:

- Estéril.
- Somente para infusão por gravidade.
- Ponta perfurante com tampa protetora.
- Tubo flexível de PVC de 150cm.
- Abertura para ventilação de ar com filtro (membrana hidrófoba e bacteriológica).
- Injetor lateral tipo Y com membrana auto cicatrizante.
- Pinça rolete reguladora de fluxo.
- Câmara gotejadora flexível com filtro de partículas antibacteriano.
- Conector macho (slip) com tampa protetora.
- Possui DEHP.
- Látex free;
- Certificação INMETRO.
- Descartável, de uso único e individual.
- Material: Polietileno, polipropileno e Acrilonitrila-Butadieno Estireno (ABS).

Descrição:

Indicação de uso:

- Equipos de infusão gravitacional macrogotas (20 gotas/ml), com conector Luer Slip, desenvolvido para administração de medicamentos e soluções pela via endovenosa.

Modo de Uso:

- 1 • Verifique o tipo adequado, conforme indicação na embalagem.
- 2 • Verifique a integridade da embalagem.
- 3 • Retire o equipo da embalagem o mais próximo possível do momento de uso.
- 4 • Execute o procedimento.
- 5 • Após o uso, descarte o equipo imediatamente em local para materiais contaminados.
- 6 • Uso único. Destruir após o uso. Proibido reprocessar.

EQUIPO NUTRIÇÃO ENTERAL ESCALONADO



DESCARPACK / MEDIX

Especificação Técnica:

- Fabricado em polietileno, polipropileno e Acrilonitrila-Butadieno-Estireno (ABS).
- Câmara gotejadora flexível de 48mm - Macrogotas 20gotas/ml.
- Não possui entrada de ar (respiro).
- Não possui filtro de solução.
- Não possui injetor lateral.
- Ponta perfurante com tampa protetora.
- Tubo flexível de PVC de 150cm na cor azul.
- Pinça rolete reguladora de fluxo.
- Conector escalonado com tampa protetora.
- Possui DEHP.
- Látex free.
- Estéril.
- Descartável e de uso único.
- Atóxico e apirogênico.

Descrição:

Indicação de uso:

- Equipos de Nutrição Enteral Medix Brasil, foi desenvolvido para administrar soluções enterais, realizando a ligação entre a sonda de alimentação enteral ligada ao paciente e o recipiente de solução que contém o alimento a ser administrado. "Não possui entrada de ar (respiro)"

Modo de Uso:

- 1 • Antes de fazer a conexão do frasco ao equipo, garanta que pinça do rolete esteja fechada, para que o produto não seja desperdiçado.
- 2 • Antes de conectar o equipo ao paciente, coloque o frasco acima da cabeça do mesmo, no suporte específico para isso e abra a pinça, garantindo o preenchimento do equipo e a saída completa do ar.
- 3 • Quando o equipo estiver completamente preenchido, feche a pinça. Conecte o tubo à sonda do paciente e abra a pinça, tomando cuidado para que o gotejamento não esteja muito rápido.
- 4 • Verifique se a sonda está fixa, garantindo que a alimentação seja feita da forma Uso único. Destruir após o uso. Proibido reprocessar.

EQUIPO BURETA



MARCA: DESCARPACK / MEDIX

TAMANHO: 150 ML

Descrição:

O Equipamento Bureta é desenvolvido para infusão gravitacional de medicamentos e soluções pela via endovenosa, proporcionando maior confiabilidade entre o volume nominal e o volume real de infusão.

Modo de Uso:

1. Verificar cada embalagem unitária antes do uso.
2. Avaliar as condições da embalagem e prazo de validade.
3. Abrir a embalagem conforme técnica asséptica.
4. Retirar a tampa protetora da ponta perfurante e conectar ao soro.
5. Retirar a tampa protetora do conector macho e conectar ao escalpe cateter (previamente introduzido no paciente de forma asséptica.)
6. Caso seja necessário, introduza medicação pelo injetor lateral.
7. Ao final do procedimento, descartar o produto em local apropriado.

Especificação Técnica:

- Fabricado em PVC.
- Estéril.
- Atóxico e apirogênico.
- Câmara gotejadora microgotas.
- Bureta graduada de 150 mL.
- Dispositivo para entrada de ar.
- Filtro hidrófobo e bacteriológico.
- Regulador de fluxo.
- Injetor lateral com membrana auto cicatrizante.
- Aprovado pelo INMETRO.
- Descartável e de uso único.



LUVA CIRURGICA LATEX C/PO



MARCA: MEDIX

TAMANHO: 6.5 PAR, 7.0 PAR, 7.5 PAR, 8.0 PAR, 8.5 PAR.

Descrição:

- Esterilizada por GAMA, é indicada para procedimentos cirúrgicos e proporciona uma barreira contra contaminação.
- Produto descartável e de uso único. Proibido reprocessar e necessário descartar em local para materiais contaminados após o uso.

Especificação Técnica:

- Luva cirúrgica de látex estéril lubrificada com pó.
- Superfície texturizada e antiderrapante.
- Formato anatômico.

